





Epidemiologică și Infecții
Centrul Național de Referință pentru Infecții Respiratorii

1 Scoateți de capacul de siguranță albastru

2 Țineți văzută porțocaliul la distanță de aproximativ 17 cm față de partea exterioară a coapsei și inspirați ferm în partea exterioară a coapsei (ascultați click-ul).
Țineți ferm în coapsă timp de 5 secunde.

3 Solicitați asistență medicală de urgență

NUMĂRUL ALBULUI

EpiPen 150 micrograme
soluție injectabilă în stilou preumplut
Adrenalină

1

Scoateți
capacul de
siguranță
albastru



2

Țineți vârful
portocaliu la distanță de
aproximativ 10 cm față
de partea exterioară a
coapsei și înfigeți ferm
în partea exterioară a
coapsei
(ascultați
click-ul).



Țineți ferm în coapsă
timp de 5 secunde.

3

Solicitați
asistență medicală
de urgență.

VÂRFUL ACULUI

VÂRFUL ACULUI

